



VELA HipHop[®] 100



VELA HipHop[®] 300

VELA HipHop[®] 300

BENUTZERHANDBUCH



1.4.4 Sitz	10
1.4.4.1 Sitztiefe	10
1.4.5 Zubehör	10
1.4.5.1 Nachmontierung von Zubehör:	10
1.4.5.2 Fuß- und Knöchelspange	11
1.4.5.3 Körperstützen	11
1.4.5.4 Kniestop	11
1.4.5.5 Tisch	11
1.4.5.6 Schiebebügel	11
1.4.5.7 Fußstütze	11
1.4.6 Technische Informationen zum VELA Hip Hop 100	11

1.5 VELA HIP HOP 300/300E

1.5.1 Höheneinstellung	12
1.5.2 Sitz	12
1.5.2.1 Kippvorrichtung	12
1.5.2.2 Bezug	12
1.5.2.3 Komfortkeile	12
1.5.2.4 Schaumzone	12
1.5.3 Rücken	13
1.5.3.1 Rückentiefe	13
1.5.3.2 Rückeneinstellung und Rückenhöhe	13
1.5.3.3 Abnehmbarer Rücken	13
1.5.3.4 Ruheposition	13
1.5.3.5 Bremsfunktion	13
1.5.3.6 Nackenstütze	13
1.5.3.7 Armlehne	14
1.5.3.8 Schiebebügel	14
1.5.3.9 Fußstützen	14
1.5.4 Zubehör	14
1.5.4.1 Nachmontierung von Zubehör:	14
1.5.4.2 Fuß- und Knöchelspange	14
1.5.4.3 Körperstützen	14
1.5.4.4 Kniestop	14
1.5.4.5 Tisch	15
1.5.5 Wichtig bezgl. VELA Hip Hop 300 Batterie	15
1.5.5.1 Das Wiederaufladen der Batterie	15
1.5.5.2 Die Batterie einsetzen	15
1.5.5.3 Das Wiederaufladen der Batterie	15
1.5.5.4 Warnung, VELA Hip Hop 300E	15
1.5.6 Technische Informationen	15

INHALTSVERZEICHNIS

1.0. EINLEITUNG	4
1.1. SICHERHEIT	5
1.1.1 Garantie	5
1.1.2 Das Auspacken des Stuhls	5
1.2. DIE PFLEGE DES VELA HIP HOP	6
1.2.1 Räder	6
1.2.2 Gestell	6
1.2.3 Polster	6
1.2.4 Fleckenentfernung	6
1.2.4.1 Blut	6
1.2.4.2 Tinte	6
1.2.4.3 Schokolade, Fett und Süßigkeiten	6
1.2.4.4 Gras und Gemüse	6
1.2.4.5 Kaffee, Tee und Milch	6
1.2.4.6 Kugelschreiber und Kosmetik	6
1.2.4.7 Schuhcreme	6
1.2.4.8 Stearin	7
1.2.4.9 Marmelade, Sirup, Obst und Fruchtsaft	7
1.2.4.10 Kaugummi	7
1.2.4.11 Urin	7
1.2.4.12 Wein & Spirituosen	7
1.3. GENERELLE RICHTLINIEN	7
1.3.1 Transport	7
1.3.2 Stabilität und Gleichgewicht	7
1.3.3 Recycling	7
1.4. VELA HIP HOP 100	8
1.4.1 Höheneinstellung	8
1.4.2 Sitz	8
1.4.2.1 Kippvorrichtung	8
1.4.2.2 Bezug	8
1.4.2.3 Komfortkeile	8
1.4.2.4 Schaumzone	8
1.4.3 Rücken	9
1.4.3.1 Rückeneinstellung und Rückenhöhe	9
1.4.3.2 Abnehmbarer Rücken	9
1.4.3.3 Bremsfunktion	9
1.4.3.4 Nackenstütze	10
1.4.3.5 Armlehne	10

1.0 EINLEITUNG

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE

wir möchten Ihnen gerne dafür danken, dass Sie einen VELA Hip Hop gekauft haben. Wir sind sicher, dass er Ihnen täglich Freude machen wird. Das Benutzerhandbuch gibt Ihnen nützliche Informationen über VELA Hip Hops Regulierung, Bedienung und Pflege, sowie seine technischen Daten usw.

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt VELA Hip Hop 100, VELA Hip Hop 300 und VELA Hip Hop 300E.

WICHTIG

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch und verwahren Sie es für den späteren Gebrauch. Es soll für den Nutzer immer zugänglich sein. Dieses Benutzerhandbuch soll den Stuhl immer begleiten.

Man kann es auch auf VELAs Webseite finden: **www.vela.eu**

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte VELAs Fachhändler in Ihrem Land.

Sie können auch Informationen über den VELA Hip Hop auf VELAs Webseite finden: **www.vela.eu**

VELA behält sich das Recht für Änderungen vor.

Vermund Larsen A/S

VELA

Goeteborgvej 12
DK-9200 Aalborg
Denmark /Dänemark
www.vela.eu

1.1 SICHERHEIT

Dieser Stuhl ist mit dem CE-Zeichen versehen und hält alle Regeln ein, die in der EU gelten. Der Stuhl wird von VELA, Vermund Larsen A/S, Gøteborgvej 12, 9200 Aalborg SV, Dänemark, hergestellt.

Der VELA Hip Hop ist ein Stuhl für sitzende, leicht behinderte Kinder.

1.1.1 GARANTIE

VELA räumt Ihnen 24 Monate Garantie gemäß dem Handelsgesetz ein. Die Garantie gilt nur bei der Anwendung originaler Ersatzteile und originalem Zubehör sowie bei Änderungen, die von einem Fachmann vorgenommen worden sind.

VELA übernimmt keine Verantwortung für Schäden am Produkt oder am Benutzer, die entstanden sind durch:

- Transport
- Missbrauch
- Normale Abnutzung
- Verkehrte Nutzung
- Verwendung falscher Ersatzteile und falschen Zubehörs
- Änderungen, die nicht von einem Fachmann vorgenommen worden sind

1.1.2 DAS AUSPACKEN DES STUHLS

VELA Hip Hop wird in einer Pappverpackung geliefert, bei deren Entwicklung Umwelt und Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt standen.

Sollte der Stuhl Mängel oder Transportschäden aufweisen, bitten wir Sie, VELA sofort zu kontaktieren. Versuchen Sie bitte nicht selbst, eventuelle Schäden zu reparieren oder den Stuhl zu benutzen.

VELA HIP HOP 100

- 1 Stuhl
- Dieses Benutzerhandbuch
- Etwaiges extra Zubehör

VELA HIP HOP 300

- 1 Stuhl
- Dieses Benutzerhandbuch
- Etwaiges extra Zubehör

VELA HIP HOP 300E

- 1 Stuhl
- Dieses Benutzerhandbuch
- Etwaiges extra Zubehör

1.2 DIE PFLEGE DES VELA HIP HOP

Wir empfehlen, den VELA Hip Hop einmal im Jahr gründlich zu untersuchen, um z. B. beschädigte oder defekte Teile zu entdecken. Außerdem ist es wichtig zu kontrollieren, ob das Kind gewachsen ist und deshalb ein größeres Modell braucht oder etwaiges Zubehör justiert werden muss. Sie sollten selbst regelmäßig die abnehmbaren Teile nachstellen.

1.2.1 RÄDER

Wir empfehlen, dass die Räder in regelmäßigen Abständen nachgesehen und von möglichen Fäden u. a. befreit werden.

1.2.2.GESTELL

Reinigen Sie das Gestell mit lauwarmem Wasser, dem Sie eventuell ein pH-neutrales Reinigungsmittel beifügen können.

1.2.3 POLSTER

Die Bezüge sind aus Mikrofasern hergestellt, die sehr Schmutz abweisend sind. Sollten Sie inkontinenzgeschützte Bezüge gekauft haben, werden diese im Schonprogramm der Waschmaschine gewaschen.

1.2.4 FLECKENENTFERNUNG

Eine goldene Regel: Entfernen Sie den Fleck immer so schnell wie möglich. Benutzen Sie immer ein sauberes, weißes Baumwolltuch, und verwenden Sie jeweils nur kleine Mengen Reinigungsmittel.

1.2.4.1 BLUT

Blut wird mit kaltem Wasser abgewaschen. Sollte das nicht helfen, fügen Sie bitte ein pH-neutrales Reinigungsmittel hinzu.

1.2.4.2 TINTE

Entfernen Sie so viel wie möglich mit Löschpapier. Reinigen Sie die Tinte mit 20 % denaturiertem Spiritus. Benutzen Sie danach Wasser, dem Sie ein pH-neutrales Reinigungsmittel zugefügt haben.

1.2.4.3 SCHOKOLADE, FETT UND SÜSSIGKEITEN

Benutzen Sie lauwarmes Wasser, dem Sie ein pH-neutrales Reinigungsmittel zugefügt haben.

1.2.4.4 GRAS UND GEMÜSE

Benutzen Sie lauwarmes Wasser, dem Sie eventuell ein pH-neutrales Reinigungsmittel beifügen.

1.2.4.5 KAFFEE, TEE UND MILCH

Entfernen Sie so viel wie möglich mit Löschpapier. Benutzen Sie danach Wasser, dem Sie ein pH-neutrales Reinigungsmittel zugefügt haben.

1.2.4.6 KUGELSCHREIBER UND KOSMETIK

Diese entfernen Sie mit Spiritus (Ethanol).

1.2.4.7 SCHUHCREME

Beutpfen Sie die Stelle vorsichtig mit einem in Benzin oder Spiritus (Ethanol) getauchten Lappen.

1.2.4.8 STEARIN

Streichen Sie mit einem Bügeleisen über saugfähiges Papier. Entfernen Sie das Stearin mit Terpentin. Betupfen Sie die Stelle mit lauwarmem Wasser, dem Sie ein pH-neutrales Reinigungsmittel beifügen. Alternative: Siehe Kaugummi.

1.2.4.9 MARMELADE, SIRUP, OBST UND FRUCHTSAFT

Entfernen Sie so viel wie möglich mit einem Löffel. Benutzen Sie danach lauwarmes Wasser, dem Sie ein pH-neutrales Reinigungsmittel zugefügt haben.

1.2.4.10 KAUGUMMI

Legen Sie Eiswürfel in einer Plastiktüte oder ein Gefrierelement auf die Stelle. Schaben Sie das Kaugummi ab. Eventuelle Reste kann man vorsichtig mit Benzin entfernen.

1.2.4.11 URIN

1 Teil Essig ohne Farbe wird mit 2 Teilen Wasser vermischt. Benutzen Sie ein trockenes Tuch als Unterlage, wenn der Fleck durchnässt wird. Entfernen Sie die Essigmischung abwechselnd mit einem trockenen und einem feuchten Lappen.

1.2.4.12 WEIN UND SPIRITUOSEN

Entfernen Sie so viel wie möglich mit Löschpapier. Entfernen Sie den Fleck mit Wasser, dem Sie ein pH-neutrales Reinigungsmittel zufügen, und reinigen Sie ihn mit verdünntem Spiritus (Ethanol).

1.3 GENERELLE RICHTLINIEN

Um den korrekten Gebrauch des VELA Hip Hop zu gewährleisten, muss Folgendes beachtet werden:

TRANSPORT

Beim Transport des VELA Hip Hop sollten Sie immer daran denken, den Stuhl zu verriegeln. Während des Transportes darf niemand in dem Stuhl sitzen.


STABILITÄT UND GLEICHGEWICHT

Der VELA Hip Hop ist als ein Stuhl für den täglichen Gebrauch in der Schule und zu Hause entwickelt worden. Er soll bei Sitzarbeit benutzt werden und nicht als Rollstuhl. Alle Bewegungen in einem VELA Hip Hop haben einen Einfluss auf den Schwerpunkt des Stuhls. Für optimale Sicherheit empfehlen wir:

- Das Gewicht des Benutzers darf 60 kg nicht überschreiten, doch ist auch das Aktivitätsniveau von wesentlicher Bedeutung. Eine Person, die sich sehr stark im Stuhl bewegt, sollte vor dem Einkauf einen Verkäufer von VELA kontaktieren.
- Man darf nicht auf dem Stuhl stehen.
- Man darf nicht auf der Fußplatte stehen. Sie ist nur zum Ein- und Aussteigen da.
- Der Stuhl ist nicht als Rollstuhl gedacht.
- Der Stuhl sollte, wenn er umgestellt wird, immer verriegelt sein.

RECYCLING

Ein Teil des Stuhlmaterials kann recycelt werden. Liefern Sie den Stuhl bei VELAs Fachhändler oder in Ihrer Recyclingabteilung ab.

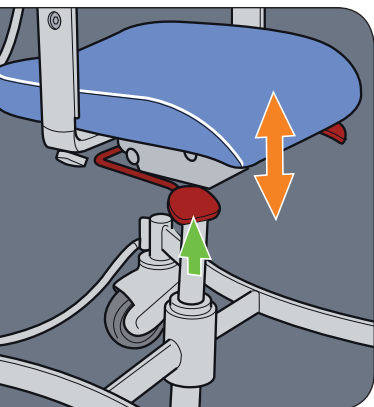

1.4 VELA HIP HOP 100

1.4.1 HÖHEEINSTELLUNG


Die Höhe der VELA Hip Hop 100-Serie kann mit Hilfe einer Gasfeder reguliert werden. Sie tun dies, indem Sie an einem der kleinen Griffe mit Flugzeugen ziehen.



1.4.2 SITZ

1.4.2.1 KIPPVORRICHTUNG

Die Kippvorrichtung für den Sitz wird mit Hilfe des Handgriffs unter dem Sitz reguliert.

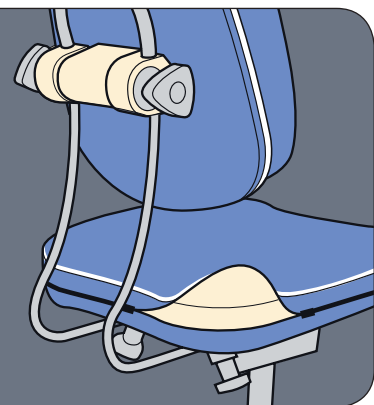

1.4.2.2 BEZUG


Der Bezug kann nicht entfernt werden. Sie können ihn jedoch an den Reißverschlüssen öffnen und dadurch an die Komfortkeile gelangen. Siehe auch Ratschläge für die Pflege des Bezugs auf Seite 6.

1.4.2.3 KOMFORTKEILE

Es ist möglich, den Sitz dem Kind anzupassen, indem man die mitgelieferten Komfortkeile einstellt.

1.4.2.4 SCHAUMZONE

Im Sitz befinden sich Schaumzonen. Diese ermöglichen es, den Stuhl jedem Kind individuell perfekt anzupassen. Die Schaumzonen können umgedreht werden, und man kann zwischen einer harten und einer weichen Zone wählen.

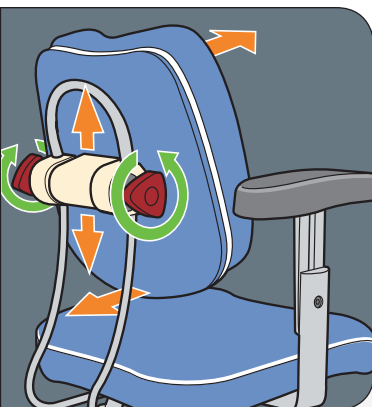


1.4.3 RÜCKEN

1.4.3.1 RÜCKENEINSTELLUNG UND RÜCKENHÖHE

Der Winkel der Rückenlehne wird mit Hilfe von zwei Griffen auf der Rückseite der Rückenlehne eingestellt. Beide Griffe müssen gelöst werden, um diesen Winkel zu ändern. Denken Sie daran, die Handgriffe hinterher wieder festzuspannen.

Diese Griffe benutzt man auch, um die Höhe der Rückenlehne zu regulieren.

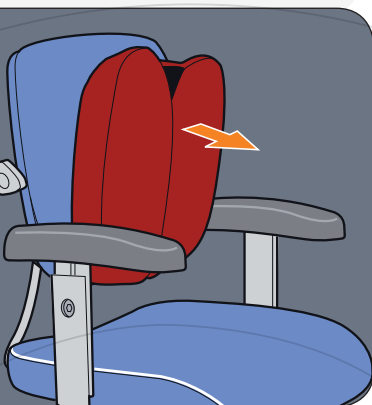


1.4.3.2 ABNEHMBARER RÜCKEN

Es ist möglich, das Rückenpolster abzunehmen und den Bezug im Schönprogramm bei max. 30 Grad zu waschen. Durch den Reißverschluss auf der Rückseite des Rückenpolsters ist es möglich, an das Polster selbst zu gelangen und dort eventuell extra Stützkissen anzubringen.


BEACHTEN SIE BITTE:

Dies gilt nicht für den kleinsten Stuhl in dieser Serie, VELA Hip Hop 100 I und VELA Hip Hop 100E I. Bei diesen Modellen können Polster und Bezug nicht entfernt werden.

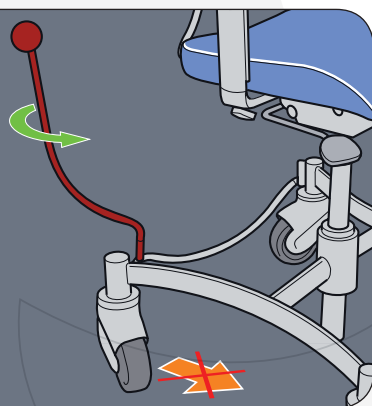

1.4.3.3 BREMSFUNKTION

VELA Hip Hop hat eine Zentralbremse, die mit Hilfe der Handbremse zur Rechten oder Linken des Kindes aktiviert wird. Man kann die Bremse selbst von rechts nach links umstellen, indem man den Gummipfropfen entfernt und die Bremse am anderen Rad befestigt. Die Handbremse wird nach vorne geschoben, um die Räder zu verriegeln, und nach hinten gezogen, um sie zu entriegeln.

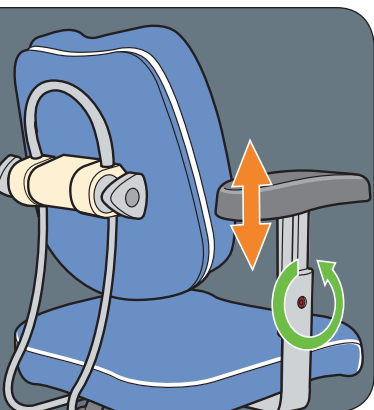

1.4.3.4 NACKENSTÜTZE

Sie regulieren die Nackenstütze dadurch, dass Sie die Flügelschrauben lösen. Denken Sie daran, sie hinterher wieder festzuschrauben.

1.4.3.5 ARMLEHNE

Die Armlehne kann sowohl in der Höhe als auch in der Breite reguliert werden. In der Höhe geschieht dies, indem man die Schraube mit dem beiliegenden Schlüssel löst. Denken Sie daran, sie wieder gut festzuschrauben.

Die Breite wird unter dem Sitz in der Zubehörrille dadurch reguliert, dass man die beiden Schrauben löst und die Metallschiene reguliert, die die Armlehne hält. Denken Sie daran, die Schrauben mit dem beiliegenden Werkzeug wieder gut festzuschrauben.



1.4.4 SITZ

1.4.4.1 SITZTIEFE

Die Tiefe des Sitzes kann mit Hilfe von Handgriffen regulieren, die unter der Hinterkante des Sitzes sowohl rechts als auch links angebracht sind. Beide Griffe müssen gelöst werden, um die Platzierung der Rückenlehne zu regulieren. Denken Sie daran, die Handgriffe hinterher wieder festzuspannen.

1.4.5 ZUBEHÖR

Zubehör ist standardgemäß bei der Lieferung montiert.

1.4.5.1 NACHMONTIERUNG VON ZUBEHÖR:

- Seitenstützen


Die Seitenstützen werden an der Armlehnenstange montiert. Bitte schrauben sie die Inbuschraube aus der Armlehnenstange und entfernen Sie das innere Plastikteil, indem Sie die 4 Sternschrauben entfernen. Die Seitenstützen montieren Sie jetzt mit der Inbuschraube wo vorher das innere Plastikteil war.

- Gurte und Westen
- Oberschenkelhalter

Es wird in den beiden Rillen, die unter dem Sitz auf beiden Seiten angebracht sind, nachmontiert. Dies geschieht mit dem folgenden Zubehör:

1.4.5.2 FUSS- UND KNÖCHELSPANGE

Diese wird nachmontiert, indem man das Band durch die Löcher in der Fußplatte zieht.

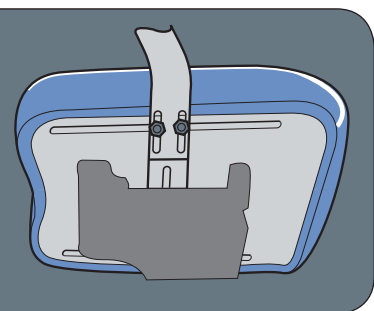

1.4.5.3 KÖRPERSTÜTZEN

Körperstützen werden an der Rückenlehne genau wie die Nackenstütze befestigt.

1.4.5.4 KNIESTOP

Der Kniestop wird an der Aufhängung im Sitz festgeschraubt.

1.4.5.5 TISCH

Der Tisch wird in der Aufhängung für die Armlehne befestigt.

1.4.5.6 SCHIEBEBÜGEL

Der Schiebebügel ist extra Zubehör.

1.4.5.7 FUSSTÜTZE

Die Fußstütze gehört als extra Zubehör zur VELA Hip Hop 100-Serie. Die Fußplatte kann in der Höhe reguliert werden, indem man den Handgriff hinter der Fußplatte löst. Denken Sie daran, ihn hinterher wieder gut festzuschrauben.

TECHNISCHE INFORMATIONEN ZUM VELA HIP HOP 100

Sitz:

- Bezug: Polyester
- Plastikteile: PA6-GF

Gestell:

- Pulverlackierter Stahl

	VELA Hip Hop 100 I	VELA Hip Hop 100 II	VELA Hip Hop 100 III
Sitzhöhe	38-48 cm Stufenweise Einstellung 10 cm	38-48 cm Stufenweise Einstellung 10 cm	35-43 cm Stufenweise Einstellung 10 cm
Sitz	27(b) x 30 cm	32(b) x 35 cm	36(b) x 43 cm
Sitztiefe	25-30 cm	30-35 cm	35-43 cm
Rückenlehne	22(b) x 18 cm	26(b) x 26 cm	28(b) x 35 cm
Armlehnenkissen	20 x 6 cm	20 x 6 cm	20 x 6 cm
Armlehnenhöhe	10-22 cm	10-22 cm	10-22 cm
Abstand zwischen Armlehnen	21-29 cm	26-34 cm	30-38 cm
Fußstütze	19-25 cm	22-32 cm	29-41 cm
Sitzwinkel	-8°- +10°	-8°- +10°	-8°- +10°
Rückenlehnenwinkel	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°
Unterrahmen	53 x 55 cm	53 x 55 cm	53 x 55 cm
Gewicht	19 kg	19 kg	19 kg
Kapazität	60 kg	60 kg	60 kg

1.5 VELA HIP HOP 300/300E

1.5.1 HÖHENEINSTELLUNG

Die Höhe der VELA Hip Hop 300-Serie kann entweder mit Hilfe einer Gasfeder (VELA Hip Hop 300) oder elektrisch (VELA Hip Hop 300E) reguliert werden.

VELA HIP HOP 300

Die Höhe wird an dem Höhenregulierungsgriff reguliert, der unter der Armlehne angebracht ist.

VELA HIP HOP 300E

Mit Fernbedienung

Die Höhe wird durch einen Druck auf die mitgelieferte Fernbedienung reguliert. Um den Stuhl zu höher zu stellen, drücken Sie auf [+], und um ihn zu senken auf [-].

Die Höhe wird durch einen Druck auf die mitgelieferte Fernbedienung reguliert. Um den Stuhl zu höher zu stellen, drücken Sie auf [+], und um ihn zu senken auf [-].



1.5.2 SITZ

1.5.2.1 KIPPVORRICHTUNG

Die Kippvorrichtung für den Sitz wird mit Hilfe des Handgriffs unter dem Sitz reguliert

1.5.2.2 BEZUG




Der Bezug kann nicht entfernt werden. Sie können ihn jedoch an den Reißverschlüssen öffnen und dadurch an die Komfortkeile gelangen. Siehe auch Ratschläge für die Pflege des Bezugs auf Seite 6.

1.5.2.3 KOMFORTKEILE

Es ist möglich, den Sitz dem Kind anzupassen, indem man die mitgelieferten Komfortkeile einstellt.

1.5.2.4 SCHAUMZONE


Im Sitz befinden sich Schaumzonen. Diese ermöglichen es, den Stuhl jedem Kind individuell perfekt anzupassen. Die Schaumzonen können umgedreht werden, und man kann zwischen einer harten und einer weichen Zone wählen.

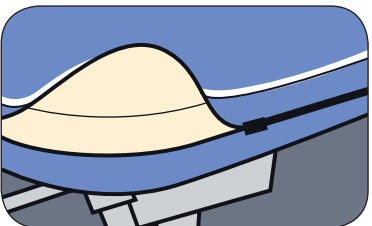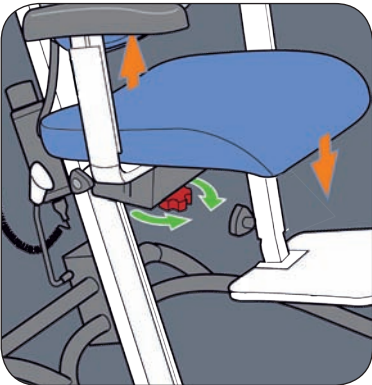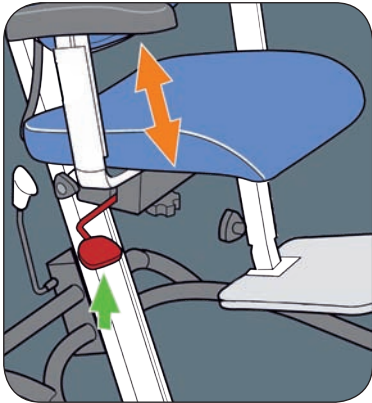

1.5.3 RÜCKEN


1.5.3.1 RÜCKENTIEFE

Die Tiefe des Rückens kann man mit Hilfe von Handgriffen regulieren, die unter der Hinterkante des Sitzes sowohl rechts als auch links angebracht sind. Beide Griffe müssen gelöst werden, um die Platzierung der Rückenlehne zu regulieren. Denken Sie daran, die Handgriffe hinterher wieder festzuspannen.

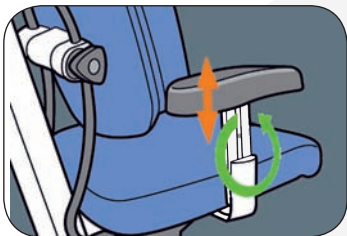

1.5.3.2 RÜCKENEINSTELLUNG UND RÜCKENHÖHE

Der Winkel der Rückenlehne wird mit Hilfe von zwei Griffen auf der Rückseite der Rückenlehne eingestellt. Beide Griffe müssen gelöst werden, um diesen Winkel zu ändern. Denken Sie daran, die Handgriffe hinterher wieder festzuspannen. Diese Griffe benutzt man auch, um die Höhe der Rückenlehne zu regulieren.

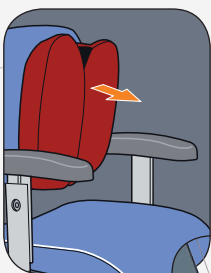

1.5.3.3 ABNEHMBARER RÜCKEN

Es ist möglich, das Rückenpolster abzunehmen und den Bezug im Schonprogramm bei max. 30 Grad zu waschen. Durch den Reißverschluss auf der Rückseite des Rückenpolsters ist es möglich, an das Polster selbst zu gelangen und dort eventuell extra Stützkissen anzubringen.


BEACHTEN SIE BITTE: Dies gilt nicht für den kleinsten Stuhl in dieser Serie, VELA Hip Hop 300 I und VELA Hip Hop 300E I. Bei diesen Modellen können Polster und Bezug nicht entfernt werden.

1.5.3.4 RUHEPOSITION

Die VELA Hip Hop 300-Serie bietet dem Kind die Möglichkeit, den Stuhl zum Ruhen zu benutzen. Dies kann man tun, indem man

1. Die Räder verriegelt.
2. Auf das Auslöserpedal hinter der Säule tritt. Man kann zwischen vier verschiedenen Positionen wählen.

WICHTIG! Halten Sie die Säule gut fest, um ein zu kräftiges Wippen des Sitzes zu vermeiden.

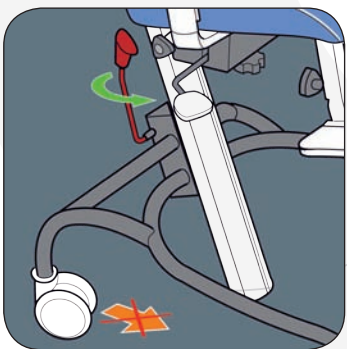


1.5.3.5 BREMSFUNKTION

Der VELA Hip Hop hat eine Zentralbremse an allen vier Rädern, die mit Hilfe der Handbremse zur Rechten des Kindes aktiviert wird. Die Handbremse wird nach vorne geschoben, um die Räder zu verriegeln, und nach hinten gezogen, um sie zu entriegeln.

1.5.3.6 NACKENSTÜTZE

Sie regulieren die Nackenstütze dadurch, dass Sie die Schrauben lösen.

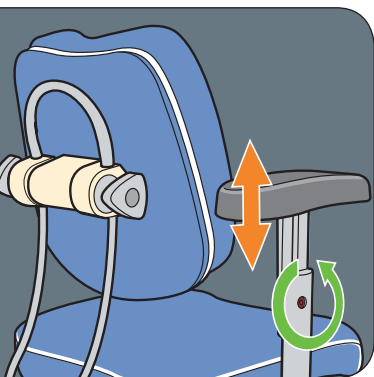


1.5.3.7 ARMLEHNE

Die Armlehne kann sowohl in der Höhe als auch in der Breite reguliert werden. In der Höhe geschieht dies, indem man die Schraube mit dem beiliegenden Schlüssel löst. Denken Sie daran, sie wieder gut festzuschrauben. Die Breite wird unter dem Sitz in der Zubehörrille dadurch reguliert, dass man die beiden Schrauben löst und die Metallschiene reguliert, die die Armlehne hält. Denken Sie daran, die Schrauben mit dem beiliegenden Werkzeug wieder gut festzuschrauben.

1.5.3.8 SCHIEBEBÜGEL

Der Schiebebügel kann in der Höhe verstellt werden, indem man den Handgriff löst. Denken Sie daran, ihn hinterher wieder gut festzuschrauben.

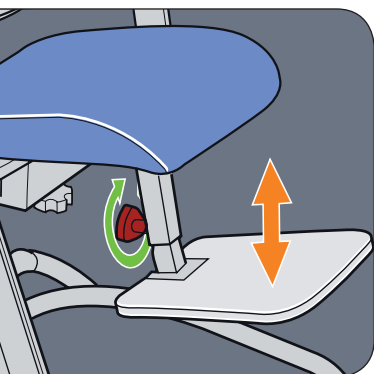

1.5.3.9 FUSSTÜTZEN

Die Fußstütze, die zur VELA Hip Hop 300-Serie gehört, kann entfernt werden. Die Fußplatte kann in der Höhe reguliert werden, indem man den Handgriff hinter der Fußplatte löst. Denken Sie daran, ihn hinterher wieder gut festzuschrauben.

1.5.4 ZUBEHÖR

Zubehör ist standardgemäß bei der Lieferung montiert.

1.5.4.1 NACHMONTIERUNG VON ZUBEHÖR:

• Seitenstützen

Die Seitenstützen werden an der Armlehnenstange montiert. Bitte schrauben sie die Inbuschschraube aus der Armlehnenstange und entfernen Sie das innere Plastikteil, indem Sie die 4 Sternschrauben entfernen. Die Seitenstützen montieren Sie jetzt mit der Inbuschschraube wo vorher das innere Plastikteil war.

• Gurte und Westen

• Oberschenkelhalter

Es wird in den beiden Rillen, die unter dem Sitz auf beiden Seiten angebracht sind, nachmontiert. Dies geschieht mit dem folgenden Zubehör:

1.5.4.2 FUSS- UND KNÖCHELSPANGE


Diese wird nachmontiert, indem man das Band durch die Löcher in der Fußplatte zieht.

1.5.4.3 KÖRPERSTÜTZEN

Körperstützen werden an der Rückenlehne genau wie die Nackenstütze befestigt.

1.5.4.4 KNIESTOP

Der Kniestop wird an der Aufhängung im Sitz festgeschraubt.

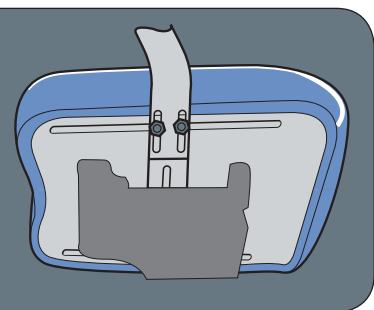

1.5.4.5 TISCH

Der Tisch wird in der Aufhängung für die Armlehne befestigt.

1.5.5 WICHTIG BEZGL. VELA HIP HOP 300E BATTERIE

1.5.5.1 DAS WIEDERAUFLADEN DER BATTERIE

Sie sollte jeden Tag wieder aufgeladen werden. Dies kann man tun, indem man die Batterie aus ihrer Halterung nimmt und in den Auflader setzt. Die Batterie ist wieder aufgeladen, wenn sie konstant rot und grün leuchtet.

1.5.5.2 DIE BATTERIE EINSETZEN

Die Batterie wird eingesetzt, indem man sie in die Halterung setzt und sie dreht, bis sie einen leisen Heulton von sich gibt, was bedeutet, dass sie korrekt angebracht worden ist.

1.5.5.3 DAS WIEDERAUFLADEN DER BATTERIE

Tägliche Wiederaufladung wird empfohlen. Das Ladegerät ist elektronisch gesteuert und kann bis zum nächsten Gebrauch des Stuhls angeschlossen bleiben.

1.5.5.4 WARNUNG, VELA HIP HOP 300E

Dieser Stuhl ist nur für 230 V vorgesehen. Das Ladegerät darf Feuchtigkeit oder Wasser nicht ausgesetzt werden, und es darf nicht zugedeckt werden. Kinder und Haustiere dürfen keinen Zugang zu dem Gerät haben, und es darf nur das mitgelieferte originale Ladegerät benutzt werden.

1.5.6 TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sitz:

- Bezug: Polyester
- Plastikteile: PA6-GF

Gestell:

- Pulverlackierter Stahl

	VELA Hip Hop 300 I	VELA Hip Hop 300 II	VELA Hip Hop 300 III	VELA Hip Hop 300E I	VELA Hip Hop 300E II	VELA Hip Hop 300E III
Sitzhöhe	28-68 cm	28-68 cm	28-68 cm	28-68 cm	28-68 cm	28-68 cm
Sitz	27(b) x 30 cm	32(b) x 35 cm	36(b) x 43 cm	27(b) x 30 cm	32(b) x 35 cm	36(b) x 43 cm
Sitztiefe	25-30 cm	30-35 cm	35-43 cm	25-30 cm	30-35 cm	35-43 cm
Rückenlehne	22(b) x 18 cm	26 x 26 cm	28(b) x 35 cm	22(b) x 18 cm	26 x 26 cm	28(b) x 35 cm
Armlehnenkissen	20 x 6 cm	20 x 6 cm	20 x 6 cm	20 x 6 cm	20 x 6 cm	20 x 6 cm
Armlehnenhöhe	10-22 cm	10-22 cm	10-22 cm	10-22 cm	10-22 cm	10-22 cm
Abstand zwischen Armlehnen	21-29 cm	26-34 cm	30-38 cm	21-29 cm	26-34 cm	30-38 cm
Fußstütze	19-25 cm	22-32 cm	29-41 cm	19-25 cm	22 - 32 cm	29 - 41 cm
Sitzwinkel	-8° - +10°	-8° - +10°	-8° - +10°	-8° - +10°	-8° - +10°	-8° - +10°
Rückenlehnen- winkel	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°
Ruhestellung	24°	24°	24°	24°	24°	24°
Unterrahmen	55(b) x 73 cm	55(b) x 73 cm	55(b) x 73 cm	55(b) x 73 cm	55(b) x 73 cm	55(b) x 73 cm
Gewicht	24 kg	24 kg	24 kg	26 kg	26 kg	26 kg
Kapazität	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg



VELA · Goeteborgvej 12 · 9200 Aalborg SV · Dänemark · Tel: +45 9634 7600 · mail@vela.dk · www.vela.eu