

VELA HIP HOP 300 / 300E

OPTIMALE SICHERHEIT UND ERGONOMIE



Die neuen Kinderstühle von VELA werden in zwei Modellen angeboten, VELA Hip Hop 300 mit Höhenverstellung durch Gasdruck und VELA Hip Hop 300E mit elektrischer Höhenverstellung.

Integrierte Feststellbremse für optimale Sicherheit

Der VELA Hip Hop 300/300E hat eine integrierte Feststellbremse, die mittels der Bremsfunktion eine hohe Stabilität gewährleistet. Die Handbremse arretiert alle vier Räder auf einmal. Sie kann durch das Kind vom Stuhl aus und auch vom Erwachsenen im Stehen bequem bedient werden.

Aktive und passive Sitzhaltung

Die Sitzhöhe des VELA Hip Hop 300/300E kann zwischen 26 cm und 64 cm eingestellt werden – das Kind kann auf Bodenhöhe spielen und sich selbst in den Stuhl setzen. Für eine aktive Sitzhaltung kann der Sitzwinkel um 10° nach vorne eingestellt werden. Und wenn das Kind eine passive und entspannte Sitzhaltung einnehmen soll, kann der Sitz bequem und sicher um 8° oder um 24° in Ruhestellung gestellt werden. Dadurch bietet der Stuhl zwei wichtige Funktionen für den Alltag des Kindes.

Flexibilität

Der VELA Hip Hop 300/300E passt sich dem Kind an – und nicht umgekehrt. Darum ist der Stuhl so konstruiert, dass er mit dem Kind mitwächst und individuell dem einzelnen Kind angepasst werden kann:

- Die Armlehnen können höhen- und breitenverstellbar und auch in Längsrichtung eingestellt werden
- Die Winkel von Sitz und Rückenlehne können eingestellt werden und sind in verschiedene Standardgrößen sowie als so genannter MD-Sitz lieferbar. MD-Sitz besonders geeignet für Kinder mit Muskeldystrophie.
- Rahmen und Polsterung in zwei verschiedenen Farben erhältlich

TECHNISCHE INFORMATION

	VELA Hip Hop 300	VELA Hip Hop 300E
Sitzhöhe	28-64 cm	26-64 cm
Sitz	27(b) x 30 cm 32(b) x 35 cm 36(b) x 43 cm 40(b) x 47 cm	27(b) x 30 cm 32(b) x 35 cm 36(b) x 43 cm 40(b) x 47 cm
Sitztiefe	25-30 cm 30-35 cm 35-43 cm 39-47 cm	25-30 cm 30-35 cm 35-43 cm 39-47 cm
Rückenlehne	22(b) x 18 cm 26(b) x 26 cm 28(b) x 35 cm	22(b) x 18 cm 26(b) x 26 cm 28(b) x 35 cm
Armlehnenkissen	20 x 6 cm	20 x 6 cm
Armlehnenhöhe	10-22 cm	10-22 cm
Abstand zwischen Armlehnen	21-29 cm 26-34 cm 30-38 cm 34-38 cm	21-29 cm 26-34 cm 30-38 cm 34-38 cm
Fußstütze	22-32 cm 27-43 cm	22-32 cm 27-43 cm
Sitzwinkel	-8° - +10°	-8° - +10°
Rückenlehnenwinkel	+/- 20°	+/- 20°
Ruhestellung	24°	24°
Unterrahmen	55(b) x 73 cm	55(b) x 73 cm
Gewicht	24 kg	26 kg
Kapazität	60 kg	60 kg

Zubehör:

VELA bietet eine breite Palette an Zubehör, um die optimale Stütze für Ihr Kind zu bieten, darunter:


- Oberschenkelführung
- Sicherheitsgurt
- Körperstütze
- Nackenstütze
- Tisch

Der Sitz hat eine praktische Montageschiene, auf der Zubehör nachträglich leicht befestigt werden kann.


Der VELA Hip Hop wird standardmäßig mit einem schicken Handbügel, aufklappbarer Fußstütze und Armlehnen geliefert.

Der VELA Hip Hop 300/300E kann in drei microfiber Farben geliefert werden – rot, schwarz oder blau. Auch lieferbar in 99 anderen Farben, gegen mehrpreis. Der Rahmen ist in dunkelgrau erhältlich.

Stofffarben:

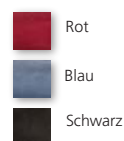

Rahmenfarben:

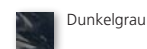

Kontakt

Falls Sie weitere Informationen über den VELA Hip Hop 300/300E wünschen, rufen Sie bei VELA in Dänemark an unter +45 9634 7600, schicken Sie ein E-Mail an mail@vela.dk, oder besuchen Sie im Internet die Seite www.vela.eu.