



# B E N U T Z E R H A N D B U C H

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1.0. EINLEITUNG</b> .....	3
<b>1.1. SICHERHEIT</b> .....	4
1.1.1 Garantie .....	4
1.1.2 Verpackung .....	4
<b>1.2. DIE PFLEGE DES VELA HIP HOP 50</b> .....	5
1.2.1 Räder .....	5
1.2.2 Gestell .....	5
1.2.3 Polster .....	5
<b>1.3. GENERELLE RICHTLINIEN</b> .....	5
1.3.1 Transport .....	5
1.3.2 Stabilität und Gleichgewicht .....	5
1.3.3 Recycling .....	5
<b>1.4. EINSTELLUGEN DES VELA HIP HOP 50</b> .....	6
1.4.1 Höheneinstellung .....	6
1.4.2 Rückeneinstellung und Rückenhöhe .....	6
1.4.3 Bremsfunktion .....	6
1.4.4 Armlehne .....	7
1.4.5 Sitztiefe .....	7
1.4.6 Zubehör .....	7
<b>1.5. Technische Informationen</b> .....	8

## 1.0 EINLEITUNG

Wir möchten Ihnen dafür danken, dass Sie einen VELA Hip Hop 50 gekauft haben. Wir sind sicher, dass er Ihnen täglich Freude machen wird. Dieses Benutzerhandbuch gibt Ihnen nützliche Informationen über die Regulierung, Bedienung und Pflege sowie die technischen Daten des VELA Hip Hop 50.

Es bezieht sich auf das Modell VELA Hip Hop 50.

### WICHTIG

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch gründlich durch und bewahren Sie es für den späteren Gebrauch auf. Es soll für den Nutzer immer zugänglich sein und den Stuhl immer begleiten.

Man kann es auch auf VELAs Webseite finden: [www.vela.eu](http://www.vela.eu)

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte einen VELA Fachhändler in Ihrem Land. Weitere Informationen über den VELA Hip Hop können Sie auch auf der Webseite von VELA finden: [www.vela.eu](http://www.vela.eu)

VELA behält sich das Recht auf Änderungen vor.

Vermund Larsen A/S

### **VELA**

Goeteborgvej 12  
DK-9200 Aalborg  
Dänemark  
[www.vela.eu](http://www.vela.eu)

## **1.1 SICHERHEIT**

Dieser Stuhl ist mit dem CE-Zeichen versehen und hält alle Regeln ein, die in der EU gelten. Er wird von VELA, Vermund Larsen A/S, Goteborgvej 12, 9200 Aalborg SV, Dänemark, hergestellt.

Der VELA Hip Hop 50 ist ein Stuhl für sitzende, leicht behinderte Kinder.

### **1.1.1 GARANTIE**

VELA gewährt eine Garantie nach den Bestimmungen des dänischen Kaufgesetzes. Die Garantie gilt nur bei der Verwendung originaler Ersatzteile und originale Zubehör sowie bei Änderungen, die von einem Fachmann vorgenommen worden sind.

VELA übernimmt keine Verantwortung für Schäden am Produkt oder am Benutzer, die entstanden sind durch:

- Transport
- Missbrauch
- Normale Abnutzung
- Nutzung
- Verwendung falscher Ersatzteile und falschen Zubehörs
- Änderungen, die nicht von einem Fachmann vorgenommen worden sind

### **1.1.2 VERPACKUNG**

VELA Hip Hop 50 wird in einer Pappverpackung geliefert, bei deren Entwicklung die Umwelt und Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt standen.

Sollte der Stuhl Mängel oder Transportschäden aufweisen, bitten wir Sie, VELA sofort zu kontaktieren. Versuchen Sie bitte nicht selbst eventuelle Schäden zu reparieren oder den Stuhl zu benutzen.

## **Im Lieferumfang**

### **DES VELA HIP HOP 50 ENTHALTEN:**

- 1 Stuhl
- Dieses Benutzerhandbuch
- Ggf. Zubehör

## **1.2 DIE PFLEGE DES VELA HIP HOP 50**

Wir empfehlen, den VELA Hip Hop 50 einmal im Jahr gründlich zu untersuchen, um z. B. beschädigte oder defekte Teile zu entdecken. Außerdem ist es wichtig zu kontrollieren, ob das Kind gewachsen ist und deshalb ein größeres Modell braucht oder Zubehör justiert werden muss. Sie sollten selbst regelmäßig die abnehmbaren Teile nachstellen.

### **1.2.1 RÄDER**

Wir empfehlen, dass die Räder in regelmäßigen Abständen nachgesehen und von möglichen Fäden u. a. befreit werden.

### **1.2.2 GESTELL**

Reinigen Sie das Gestell mit lauwarmem Wasser, dem Sie eventuell ein pH-neutrales Reinigungsmittel beifügen können.

### **1.2.3 POLSTER**

Die Bezüge sind aus Mikrofasern hergestellt, die sehr Schmutz abweisend sind. Sollten Sie Inkontinenz-bezüge gekauft haben, können diese im Schonprogramm der Waschmaschine gewaschen werden.

### **1.2.4 FLECKENENTFERNUNG**

Eine goldene Regel: Entfernen Sie den Fleck immer so schnell wie möglich. Benutzen Sie immer ein sauberes, weißes Baumwolltuch und verwenden Sie jeweils nur kleine Mengen Reinigungsmittel.

## **1.3 GENERELLE RICHTLINIEN**

Um den korrekten Gebrauch des VELA Hip Hop 50 zu gewährleisten, muss Folgendes beachtet werden:

### **TRANSPORT**

Beim Transport des VELA Hip Hop 50 sollten Sie immer daran denken, den Stuhl zu verriegeln. Während des Transportes darf niemand in dem Stuhl sitzen.

### **STABILITÄT UND GLEICHGEWICHT**

Der VELA Hip Hop 50 ist als ein Stuhl für den täglichen Gebrauch in der Schule und zu Hause entwickelt worden. Er soll bei Sitzarbeit benutzt werden und nicht als Rollstuhl. Alle Bewegungen in einem VELA Hip Hop 50 haben einen Einfluss auf den Schwerpunkt des Stuhls. Für optimale Sicherheit empfehlen wir:

- Das Gewicht des Benutzers darf 60 kg nicht überschreiten, doch ist auch das Aktivitätsniveau von wesentlicher Bedeutung. Eine Person, die sich sehr stark im Stuhl bewegt, sollte vor dem Kauf des Produktes einen Verkäufer von VELA kontaktieren.
- Man darf nicht auf dem Stuhl stehen.
- Man darf nicht auf der Fußplatte stehen. Sie ist nur zum Ein- und Aussteigen da.
- Der Stuhl ist nicht als Rollstuhl gedacht.
- Der Stuhl sollte, wenn er umgestellt wird, immer verriegelt sein.

### **RECYCLING**

Ein Teil des Stuhlmaterials kann recycelt werden. Liefern Sie den Stuhl bei einem VELA Fachhändler oder in Ihrer Recyclingabteilung ab.


## 1.4 VELA HIP HOP 50

Alle Griffe sollten immer nach oben gedrückt werden, nie nach unten.



### 1.4.1 HÖHENEINSTELLUNG

Die Höhe des VELA Hip Hop 50 kann mit Hilfe einer Gasfeder verstellt werden. Sie tun dies, indem Sie an dem kleinen Griff mit dem Logo von VELA ziehen.

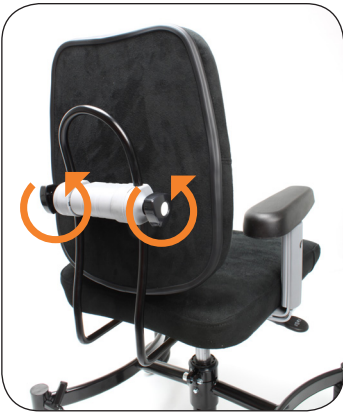

### 1.4.2. RÜCKENEINSTELLUNG UND RÜCKENHÖHE

Der Winkel der Rückenlehne wird mit Hilfe von zwei Griffen auf der Rückseite der Rückenlehne eingestellt. Beide Griffe müssen gelöst werden, um diesen Winkel zu ändern. Denken Sie daran, die Handgriffe hinterher wieder fest anzuziehen.

Diese Griffe benutzt man auch, um die Höhe der Rückenlehne zu regulieren.



### 1.4.3. BREMSFUNKTION

VELA Hip Hop 50 hat eine Zentralbremse, die mit Hilfe der Handbremse zur Rechten oder Linken des Kindes aktiviert wird.

Man kann die Bremse selbst von rechts nach links ummontieren, indem man den Gummipfropfen entfernt und die Bremse an anderen Rad befestigt.



Die Handbremse wird nach vorne geschoben, um die Räder zu verriegeln, und nach hinten gezogen, um sie zu entriegeln.



#### 1.4.4. ARMLEHNE

Die Armlehne kann sowohl in der Höhe als auch in der Breite verstellt werden. In der Höhe geschieht dies, indem man die Schraube mit dem beiliegenden Schlüssel löst. Denken Sie daran, sie wieder gut festzuschrauben.

Die Breite wird unter dem Sitz in der Zubehörrille dadurch verstellt, dass man die beiden Schrauben löst und die Metallschiene verschiebt, die die Armlehne hält. Denken Sie daran, die Schrauben mit dem beiliegenden Werkzeug wieder gut festzuschrauben.



#### 1.4.5. SITZTIEFE

Die Tiefe des Sitzes kann man mit Hilfe von Handgriffen einstellen, die unter der Hinterkante des Sitzes sowohl rechts als auch links angebracht sind. Beide Griffe müssen gelöst werden, um die Platzierung der Rückenlehne zu ändern. Denken Sie daran, die Handgriffe hinterher wieder fest anzuziehen.



#### 1.4.6. ZUBEHÖR

Zubehör ist standardgemäß bei der Lieferung montiert, muss zuvor jedoch separat bestellt werden.

#### NACHTRÄGLICHE MONTAGE VON ZUBEHÖR:

- Seitenstützen

Die Seitenstützen werden an der Armlehnenstange montiert. Bitte schrauben Sie die Inbusschraube aus der Armlehnenstange heraus und entfernen Sie das innere Plastikteil, indem Sie die vier Sternschrauben entfernen. Die Seitenstützen montieren Sie jetzt mit der Inbusschraube dort, wo vorher das innere Plastikteil war.



- Gurte und Westen. Wird in den beiden Rillen, welche sich seitlich unter dem Sitz befinden, nachmontiert.
- Oberschenkelhalter. Wird in den beiden Rillen, welche sich seitlich unter dem Sitz befinden, nachmontiert.

#### Dies geschieht mit dem folgenden Zubehör:

- Fuß- und Knöchelspange: Diese wird nachmontiert, indem man das Band durch die Löcher in der Fußplatte zieht.

- Körperstützen: Die Körperstützen werden genau wie die Nackenstütze an der Rückenlehne befestigt.
- Kniestop: Der Kniestop wird an der Aufhängung im Sitz festgeschraubt.
- Nackenstütze: Die Nackenstütze wird in die vorgebohrte Löcher in der Rückseite festgeschraubt.
- Tisch: Der Tisch wird in der Aufhängung für die Armlehne befestigt.
- Schiebebügel: Der Schiebebügel ist extra Zubehör. Die Plastikdeckel und den Schrauben auf den hinteren Rädern müssen entfernt sein, vor den Schiebebügel montiert ist. Der Schiebebügel muss mit den neuen mitgelieferten Schrauben befestigt werden. Passende Plastikdeckel sind auch mitgeliefert.
- Fußstütze: Die Fußstütze gehört als extra Zubehör zum VELA Hip Hop 50. Die Fußplatte kann in der Höhe reguliert werden, indem man den Handgriff hinter der Fußplatte löst. Denken Sie daran, ihn hinterher wieder gut festzuschrauben.

## 1.5. TECHNISCHE INFORMATIONEN

### Sitz:

- Bezug: Polyester
- Plastikteile: PA6-GF

### Gestell:

- Pulverlackierter Stahl

	VELA Hip Hop 50
<b>Sitzhöhe</b>	38-48 cm 43-58 cm Stufenweise Einstellung 10 cm
<b>Sitz</b>	32(b) x 35 cm, 36(b) x 43 cm, 40(b) x 47 cm
<b>Sitztiefe</b>	30-35 cm, 35-43 cm, 39-47 cm
<b>Rückenlehne</b>	26(b) x 26 cm, 28(b) x 35 cm
<b>Armlehnenkissen</b>	20 x 6 cm
<b>Armlehnenhöhe</b>	10-22 cm
<b>Abstand zwischen Armlehnen</b>	26-34 cm, 30-38 cm, 34-38 cm
<b>Rückenlehnenwinkel</b>	+/- 20°
<b>Unterrahmen</b>	53 x 55 cm
<b>Gewicht</b>	19 kg
<b>Kapazität</b>	60 kg

